



«Обработка многоразового инструментария»

- 1. Надеть спецодежду: халат, перчатки, маску и клеенчатый фартук. Приготовить дезраствор в двух емкостях.
- 2. В первой емкости промыть инструментарий, заполнив внутренние каналы и полости медицинского изделия.
- 3. После промывания в первой емкости, перенести инструментарий во вторую емкость с дезраствором.
- 4. Заполнить внутренние каналы и полости, полностью погрузить в дезраствор (на 1-2 см ниже поверхности дезраствора).
- 5. Закрыть емкость крышкой во время экспозиции в дезрастворе на время в зависимости от концентрации дезраствора.
- 6. После окончания обработки в дезрастворе промыть инструментарий многократно под проточной водой, сложить в лоток.
- 7. Вылить использованный дезраствор первой емкости в канализацию. Дезраствор второй емкости может быть использован повторно согласно инструкции по его применению (не изменен цвет, нет осадка и др.)
- 8. Снять перчатки, выбросить их в контейнер сбора отходов, надеть чистые перчатки.