



## **«Предстерилизационная очистка ИМН (совмещенная дезинфекция и ПСО в одном процессе)»**

- Надеть СИЗ.
- Заполнить контейнер моюще-дезинфицирующим раствором.
- Разобрать и погрузить полностью ИМН, заполнив полости, закрыть крышкой.
- Выдержать экспозиционное время.
- Очистить изделие тканевыми салфетками, ватно-марлевыми тампонами или щетками от биологических остатков, сбросить в дезинфектант (механическая очистка).
- Поместить инструменты на сетки или в лотки.
- Промыть каждое изделие под проточной водой, пропуская воду через полости
- Изделия проверить на качество ПСО, уложить и подвергнуть стерилизации.
- Ополоснуть каждое изделие в дистиллированной воде 30 секунд.
- Высушить ИМН в сухожаровом шкафу ( $T = 80—85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) до полного исчезновения влаги.
- Снять СИЗ, утилизировать в отходы класса «Б».

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?