



Алгоритм «Азопирамовая проба»

- ☐ Цель: комплексный контроль качества предстерилизационной очистки инструментария и предметов медицинского назначения от крови, моющих средств, хлорсодержащих, ржавчины и лекарственных препаратов
- ☐ Оснащение: азопирамовый реактив, пипетки для азопирамового реактива и 3% раствора перекиси водорода, лоток, ватные шарики, инструментарий для контроля
- ☐ Примечание: проба считается положительной при изменении цвета реактива: сине-фиолетовое окрашивание свидетельствует о наличии остатков крови, бурое – ржавчины или хлорсодержащих препаратов, розовое – об остатках моющих средств.
- ☐ Вымыть и осушить руки, надеть маску и перчатки
- ☐ Приготовить оснащение
- ☐ Приготовить 1% раствор азопирама: берутся в равных пропорциях разными пипетками раствор азопирама и раствор 3% перекиси водорода и смешиваются, емкость плотно закрывается крышкой
- ☐ Приготовить инструментарий, предназначенный для проверки (1% от общего количества, но не менее 4-5 изделий)
- ☐ Взять пипеткой, с маркировкой 1% раствор азопирама небольшое количество реактива и нанести на инструментарий (в полости, на обрасти соединений и места контакта с биологическими жидкостями)

- ☐ Держать инструмент над ватой и дать реактиву стекать на неё
- ☐ Через минуту оценить изменение цвета реактива. Проба считается отрицательной, если нет изменения цвета.
- ☐ При наличии положительной реакции на кровь весь инструментарий подвергается повторной обработке, начиная со второго этапа, при наличии положительной пробы на моющее средство проводится только повторное промывание инструментария под проточной водой.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?