



Алгоритм «Подготовка стерилизационной коробки (КС) к стерилизации»

- ☐ **1.** Надеть халат, чепчик, вымыть руки, надеть перчатки.
- ☐ **2.** Проверить детали коробки на герметичность: – плотность закрытия крышки; – легкость передвижения пояса и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями пояса; – прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством.
- ☐ **3.** Обработать стенки бикса, дно и крышку антисептическим раствором (0,5% раствором нашатырного спирта).
- ☐ **4.** Подготовить перевязочный материал к укладке в соответствии с нормами.
- ☐ **5.** Закрепить пояс в положении, при котором отверстия корпуса открыты.
- ☐ **6.** Выстелить дно и стенки коробки салфеткой или простыней.
- ☐ **7.** Выстелить салфеткой дно и края стерильной коробки (КС или КФ) так, чтобы она свисала на $\frac{2}{3}$ высоты емкости.
- ☐ **8.** Поместить на дно бикса индикатор стерильности
- ☐ **9.** Уложить в бикс перевязочный материал и операционное белье. Уложить послойно, рыхло, секторально, вертикально.
- ☐ **10.** Поместить второй индикатор стерильности материала в середину

бикса.

- ☐ **11.** Накрыть укладку салфеткой, свисающей с бикса.
- ☐ **12.** Поместить салфетку для обработки рук, поместить третий индикатор стерильности по верх укладки.
- ☐ **13.** Провести маркировку стерилизационной коробки. Привязать к ручке бирку и указать: дату укладки; отделение; поставить подпись, название бикса «пеленки», «закладка для стерильного стола», и т. д .
- ☐ **14.** При любом способе коробку заполняют на 70% своего объема: рыхло, свободно, параллельно движению пара для проникновения во все складки и на все поверхности стерилизуемых изделий.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?