



Алгоритм «Работа с паровыми стерилизаторами»

- Перед началом работы на паровом стерилизаторе проверьте:
- наружные поверхности парообразователя, стерилизационной камеры, трубопроводов, корпуса аппарата, водомерное стекло - нет ли трещин и изъянов;
- индикаторные лампочки манометра - они должны показывать нормальный уровень давления; - заземление корпуса стерилизатора.
- предохранительный клапан - не поврежден ли он.
- Если на стерилизаторе нет видимых повреждений, подготовьтесь к работе: - упакуйте медизделия, прошедшие предстерилизационную обработку; - прикрепите к стерилизационным коробкам или к мягкой упаковке с изделиями бирку с описанием содержимого и даты
- Загрузите упакованные медизделия в стерилизационную камеру. Норма загрузки стерилизационной камеры в зависимости от упаковки и вида изделия прописана в инструкции по эксплуатации аппарата.
- Закройте дверь стерилизатора и запустите аппарат.
- Когда стерилизация завершится: выньте стерилизационные коробки и поместите на стол, покрытый стерильной простыней; незамедлительно закройте боковые отверстия в стерилизационных коробках; накройте стерилизационные коробки второй простыней или другим концом