



«Особенности проведения генеральной уборки холодильников, располагающихся в процедурных кабинетах»

- 1. Цель: профилактика ИСМП.
- 2. Показания: санитарно-гигиеническая уборка.
- 3. Оснащение: маркированный уборочный инвентарь: емкость с дезинфицирующим средством, ветоши для поверхностей, резиновые перчатки, маска.
- 4. Отключить оборудование от электросети, вытащив вилку из розетки.
- 5. Освободить пространство от медикаментов, поместив их в аппарат с аналогичным температурным режимом.
- 6. Удалить ящики, полки, блоки и прочие элементы.
- 7. Поставить поддон под оборудование, оставив его с открытыми дверцами на 5-8 часов.
- 8. Провести разморозку (с обязательным занесением информации об этом в график). Удалить наледь и снежную шубу (далее проводится очистка холодильника).
- 9. Все части и структурные элементы холодильника дважды обработать салфеткой, которая смочена в дезинфицирующем растворе (в том числе протереть полки, поддоны, ящики).

- 10.** Тщательно промыть все обработанные поверхности проточной водой и вытереть насухо.
- 11.** После полного высыхания всех элементов холодильника – включить его в электросеть
- 12.** Примечание: - Примерно 1 раз в год нужно при помощи щетки или пылесоса очищать от пыли и грязи конденсатор, который расположен на задней стенке оборудования. - Запрещено при уборке холодильника использовать какие-либо порошки, пасты и растворы на основе щ

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?