



Алгоритм «Работа с паровыми стерилизаторами»

- ☐ **1.** Перед началом работы на паровом стерилизаторе проверьте:
- ☐ **2.** – наружные поверхности парообразователя, стерилизационной камеры, трубопроводов, корпуса аппарата, водомерное стекло – нет ли трещин и изъянов;
- ☐ **3.** – индикаторные лампочки манометра – они должны показывать нормальный уровень давления; – заземление корпуса стерилизатора.
- ☐ **4.** предохранительный клапан – не поврежден ли он.
- ☐ **5.** Если на стерилизаторе нет видимых повреждений, подготовьтесь к работе: – упакуйте медизделия, прошедшие предстерилизационную обработку; – прикрепите к стерилизационным коробкам или к мягкой упаковке с изделиями бирку с описанием содержимого и даты
- ☐ **6.** Загрузите упакованные медизделия в стерилизационную камеру. Норма загрузки стерилизационной камеры в зависимости от упаковки и вида изделия прописана в инструкции по эксплуатации аппарата.
- ☐ **7.** Закройте дверь стерилизатора и запустите аппарат.

- ☐ **8.** Когда стерилизация завершится: выньте стерилизационные коробки и поместите на стол, покрытый стерильной простыней; незамедлительно закройте боковые отверстия в стерилизационных коробках; накройте стерилизационные коробки второй простыней или другим концом

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?